

患者シミュレータAMPS-1 制御用ソフトウェア

PS Manager (日本語・USB)



型式：DSPM10

簡単 日本語ソフトウェアによる簡単操作！

便利 テストレポートを自動作成！履歴の管理ができる！




パソコン制御

PS ManagerによりAMPS-1本体で行う操作がパソコン上から簡単に行えます


効率の良いテストを実現

PS Managerの使用により、テスト設定・実行、合否判定やレポート作成まで全てパソコン上から操作でき、簡単に効率良くテストが行えます。

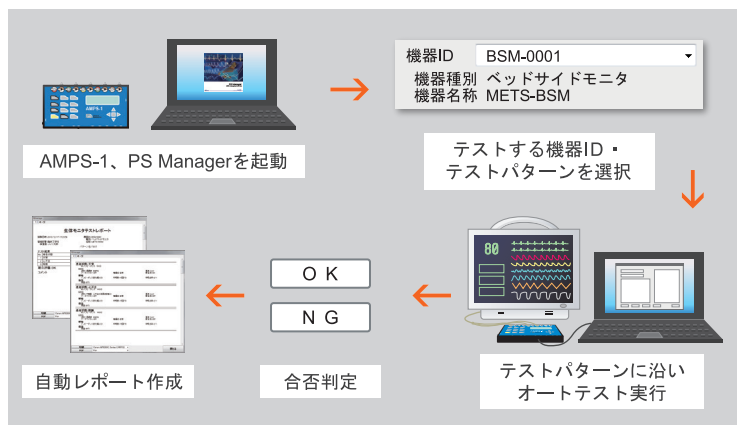

オリジナルのテストパターンが作れる

テストしたい患者状態・数値を設定し、オリジナルのテストパターンを作成できます。テストパターンはいくつでも作成できますので、簡易点検や定期点検など用途に合わせてテストを実行できます。

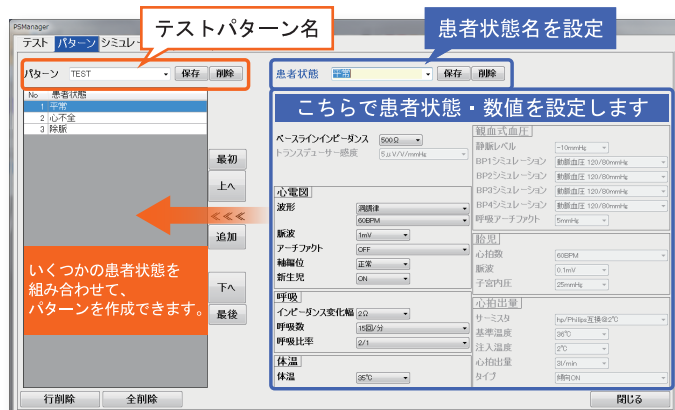


簡単オートテスト・合否判定


いくつものテストが自動で行われ、合否判定も都度記録されますのでひとつの機器に対し短時間で効率的にテストを行うことができます。

テスト(シミュレーション)は予め作成したテストパターンに沿って自動で行われます。設定したテストパターン(患者状態・数値)と、被測定機器の表示を比較し、合否判定を行うと次のテストへ進みます。(総合評価は自動で行われます。)

様々な患者状態・数値でテストが可能です！
(テスト数に制限はありません。)

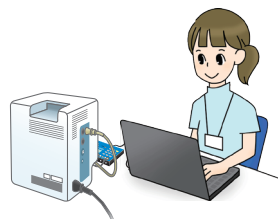

総合評価は自動で判定されます。
※すべてのテストでOK判定の場合のみ、総合評価もOKとなります。

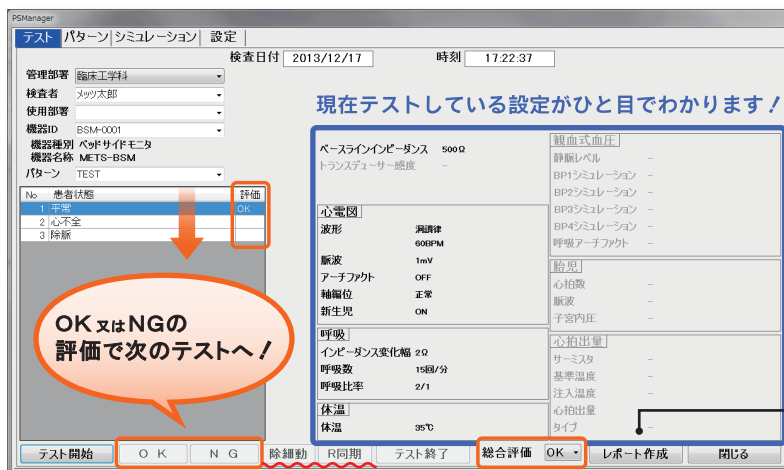

除細動、R波同期も
ボタンクリックで行えます
除細動、R波同期を実行できるテストになると、自動的にボタンがオンになります。

レポート作成ボタンで簡単にレポートが作れる！




シミュレーションモード

一連の患者状態をシミュレート！バイタルサインの学習にも利用できます

患者状態や数値を変更すると、こちらに履歴が残ります。

バイタルサインの学習にも！

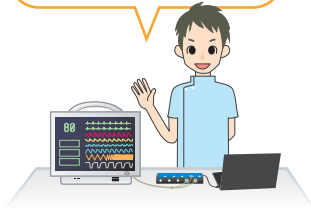

現在シミュレーションしている設定がひと目でわかります！

こちらで設定した患者状態でシミュレーションされます！

開始 戻る 停止 除細動 R同期 閉じる

AMPS-1のみだと、ボタン操作で設定・変更

PS Managerを使うと・・・
ひとつひとつの項目を探す手間がなく、
パナコン画面上で確認しながら
簡単に設定・変更できます！

簡単



検査履歴のデータ管理

検査履歴をデータベース化することにより効率的に管理できます

生体モニタテストレポート

1枚目にテスト結果 (個別評価・総合評価)

2枚目にテスト詳細 (各種テスト数値等)

簡単自動レポート作成

行ったテストパターンのテスト結果 (評価・テスト内容詳細) が明記されたレポートを、レポート作成ボタンから自動で作成することができます。また、PDF形式での保存が可能です。

総合評価、コメントで機器状況を把握

一項目でもNGがあった場合は、総合評価はNGとなります。任意のコメント (要修理・使用不可など) を入力することができる為、各機器の状況を把握することが可能です。

レポート印刷

作成したレポートは簡単に印刷できる為、書類として保管・管理することができます。

検査レポートの履歴管理

表示機器の選択や各条件の並べ替えにより、電子データとして保存された過去の検査履歴を、簡単に閲覧できます。

弊社チェックソフトのデータを、まとめて管理できます！

LAN接続により、弊社ME機器制御用ソフトウェアを使い他のパソコンで行ったテスト結果のデータを、ひとつのパソコンにまとめて管理することが可能です。

リスト印刷・CSV出力が可能

ボタンひとつで、機器種別ごとのリスト印刷が可能なので、管理記録が簡単に作成できます。また、履歴をCSV形式で出力し、市販の表計算ソフトなどを用いた点検履歴を作成可能です。

※黄背景の機器は、上の白背景の機器にひもづいているデータです。

※PS Managerと弊社ME機器情報管理システムMe-ARCの連携により、ME機器の在庫管理と精度管理を1つのシステム上で行うことができます。

※この資料に記載されているメーカー名、製品名等は、該当各社の商標または登録商標です。Datrend Systems社が各社の保証を得ているか、何らかの提携関係にあるわけではありません。

製造販売元

Something to Life **METS** 株式会社 メッツ

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mets-tokyo.jp

ホームページに
アクセス



代理店