

ブルーセンサーキット



写真のセット例 **BK-52A341**

- 電極(ブルーセンサー L-00-S/5) 5個
- 電池(アルカリ単3) 4個
- カセットテープ(60分) 1巻
- リード線固定材(スキンフィックス2703/50) ... 2枚
- 行動記録カード 1枚
- 鉛筆(ペグシル) 1本

【包装】 10セット/箱

確かな心電波形

ホルター心電図は、波形の確かさが絶対条件です。ブルーセンサーキットは、ホルター心電図用電極として定評のあるAmbu社ブルーセンサーL-00-Sを採用。独特のオフセットコネクタがアーチファクトの少ない安定した波形をお約束します。

徹底したコストダウン

不要なパッケージなどを省き、コストダウンを追求しました。

耐水性・通気性に優れたリード線固定材

リード線を身体に固定処理する簡易固定材「スキンフィックス」をセットにしました。従来の絆創膏などのようにリード線や身体に粘着剤が付着することがなく、汗や水に強い耐水性です。また、皮膚接着部は通気性に優れています。

【注】スキンフィックスは、電極のはがれ防止のために使用するものではありません。

ご要望に応じたセット内容が可能

電極の数量や電池の種類、本数などご使用のホルター心電図装置に合わせたセットができます。詳しくは販売店もしくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

●ホルター心電図用品単品リスト

品名	包装単位	袋	箱
電極 ブルーセンサー	L-00-S/25	25個	500個
電池	アルカリ単3		20本
電池	アルカリ単4		20本
電池	アルカリ9V		10本
カセットテープ	TDK AE-60 60分		100巻
カセットテープ	TDK AE-120 120分		100巻
リード線固定材	スキンフィックス 2703/50	50枚	500枚
行動記録カード		100枚	
鉛筆(ペグシル)		100本	

CAUTION

- 電極を固定する際、電極の中心部は押さないでください。
- 電極のパッケージを開封した後は、袋の口を折りたたむなどしてゲルの乾燥防止につとめてください。
- パッケージの有効期間に注意し、開封後は1か月以内に使用してください。

～ モニタリングの状態が悪い場合、次の点に注意してください ～

- 電極が古くないか。ゲルが乾燥していないか。
- 電極が患者の皮膚面から浮いていないか。剥がれていないか。
- リード線のコネクタが緩くないか。また、錆びたりしていないか。
特に、ハサミクリップ式コネクタの場合、パネが弱くなったり、接触面が錆びたりして電極との接触面が悪くなっていることがあります。

医療機器届出番号：【ブルーセンサーL】13B2X0011700001 【ブルーセンサーキット】13B2X0011700011

代理店

製造販売元

Something to Life **METS** 株式会社 **メッツ**

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 http://www.mets-tokyo.jp