

ブルーセンサー



## ホルター、長時間モニター用に最適なオフセットコネクタ心電図用電極

### ノイズの発生を抑えるオフセット構造

ブルーセンサー独特のオフセット構造は、センサー部が接着されコネクタが独立しているため、リード線の揺れや引っ張りを吸収し、ノイズの発生を最小限に抑えます。ホルターや長時間モニター用に快適にお使いいただけます。また、電極を装着したあとも簡単にコネクタの付け外しが行えます。

### 皮膚抵抗を最小にするウェットジェル


ウェットジェルは皮膚に湿潤性を持たせ素早くなじみ、皮膚抵抗を速やかに低下させます。波形の立ち上がりが良く、検査用電極のジェルとして非常に優れています。

### 即時性接着部＋長時間接着部

即時性接着部と長時間接着部の組み合わせがモニタリングの間優れた接着性と安定したシグナルをもたらします。接着面積が広いので、すばやくしっかりと接着することができ、電極の脱落を防ぎます。

### 薄い細孔紙バックング材

薄い細孔紙のバックング材を採用しているため、皮膚の呼吸を妨げず、長時間の装着においての不快感を軽減します。

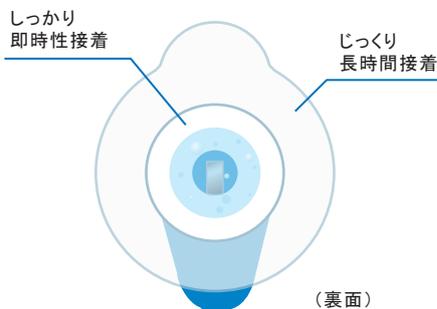

**L-00-S**

細孔紙バックング  
直径55mm

スタッドコネクタ

型式	包装
L-00-S/25	25個/袋 20袋/箱

※販売単位＝袋

### 電気的特性 (ANSI/AAMI)

ACインピーダンス	650Ω	極性電位変更レート	0.2mV/S
DCオフセット電圧	0.6mV	オフセット電位ドリフトと内部ノイズの総合値	<15μV
除細動負荷回復	10.4mV	バイアス電流変動値 (8時間以上)	<10mV



この製品の情報を  
ホームページでチェック!

# ブルーセンサーキット



写真のセット例 **BK-52A341**

- 電極(ブルーセンサー L-00-S/5) ..... 5個
- 電池(アルカリ単3) ..... 4巻
- カセットテープ(60分) ..... 1巻
- リード線固定材(スキンフィックス2703/50) ... 2枚
- 行動記録カード ..... 1枚
- 鉛筆(ペグシル) ..... 1本

【包装】 10セット/箱

## 確かな心電波形

ホルター心電図は、波形の確かさが絶対条件です。ブルーセンサーキットは、ホルター心電図用電極として定評のあるAmbu社ブルーセンサーL-00-Sを採用。独特のオフセットコネクタがアーチファクトの少ない安定した波形をお約束します。

## 徹底したコストダウン

不要なパッケージなどを省き、コストダウンを追求しました。

## 耐水性・通気性に優れたリード線固定材

リード線を身体に固定処理する簡易固定材「スキンフィックス」をセットにしました。従来の絆創膏などのようにリード線や身体に粘着剤が付着することがなく、汗や水に強い耐水性です。また、皮膚接着部は通気性に優れています。

【注】スキンフィックスは、電極のはがれ防止のために使用するものではありません。

## ご希望に応じたセット内容が可能

電極の数量や電池の種類、本数などご使用のホルター心電図装置に合わせたセットができます。詳しくは販売店もしくは弊社営業までお問い合わせ下さい。

## ●ホルター心電図用品単品リスト

品名	包装単位	袋	箱
電極 ブルーセンサー	L-00-S/25	25個	500個
電池	アルカリ単3		20本
電池	アルカリ単4		20本
電池	アルカリ9V		10本
カセットテープ	60分		100巻
カセットテープ	120分		100巻
リード線固定材 スキンフィックス	2703/50	50枚	500枚
行動記録カード		100枚	
鉛筆(ペグシル)		100本	

## CAUTION

- 電極を固定する際、電極の中心部は押さないでください。
- 電極のパッケージを開封した後は、袋の口を折りたたむなどしてゲルの乾燥防止につとめてください。
- パッケージの有効期間に注意し、開封後は1か月以内に使用してください。

～ モニタリングの状態が悪い場合、次の点に注意してください ～

- 電極が古くないか。ゲルが乾燥していないか。
- 電極が患者の皮膚面から浮いていないか。剥がれていないか。
- リード線のコネクタが緩くないか。また、錆びたりしていないか。  
特に、ハサミクリップ式コネクタの場合、バネが弱くなったり、接触面が錆びたりして電極との接触面が悪くなっていることがあります。

医療機器届出番号：【ブルーセンサー-L】13B2X0011700001 【ブルーセンサーキット】13B2X0011700011

製品詳細は弊社ホームページをご覧くださいませ！ アクセス ▶▶▶



製造販売元

Something to Life **METS** 株式会社 **メッツ**

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp  
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 http://www.mets-tokyo.jp

代理店