

新鮮凍結血漿融解装置

Barkey プラズマサーム

型式: DTM-V201

水が空気に触れない、衛生的な温湯式
清潔に効率よくFFPを融解します

衛生的

水が直接空気に触れず、
清潔にFFPの融解が可能!

メンテナンスが楽

水の交換は年1回!

簡単・効率的

最短3ステップで、
最大8バックを同時融解!




全面加温と振盪機能で
スピーディーに融解!



衛生的

加温水が空気に触れず、清潔に作業が行えます！

温湯が循環しているクッションでFFPを挟むことにより全面を均一に加熱し、振盪機能でスピーディーに融解を行います。
水が直接空気に触れないため、清潔に作業が行え、汚染リスクを低減します。水を使いドライヒーティングを行う新しい血漿融解装置です。

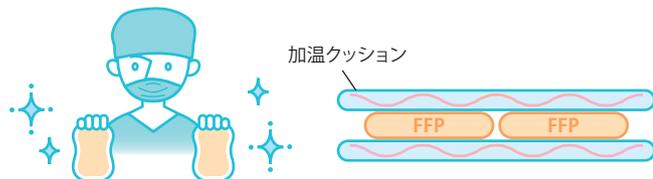

簡単
効率的

最短3ステップで、最大8バックを同時融解！

『①電源投入、②FFPを設置、③スタートボタンを押す』の3ステップで融解がスタート！操作はわかりやすく、見やすい表示で簡単・迅速にFFPの融解が行えます。
また、最大8バックまで同時融解が可能です。（※標準4バック）

お手入れ
ラクラク

水の交換は年1回。メンテナンスが容易！

水の交換の目安は年1回のみで、日常的な交換は必要ありません。また、本体は鋭角な部分を最大限に減らした丸みのある形状、錆に強いプラスチック製で、汚れを取り除きやすく簡単にメンテナンスができます。

融解温度
37℃自動制御

大きく透明な開口部



静かな動作音

簡単な操作
わかりやすい表示

融解中の異常に気づきやすい

FFPバックを設置するカバーが透明なため、融解中の様子が目視確認できます。また、水漏れ感知機能搭載で常時モニタリングされているので、もしもの水漏れ・液漏れにも素早く対応することが可能です。

！ もしものを防ぐ、安全機能

水漏れ感知・蓋開放時自動停止
過加熱時自動停止：（融解温度を37℃に自動制御しています）

製品仕様

サイズ	34cm (W) × 32cm (H) × 60cm (D)	水交換	年1回 約9ℓ (目安) ※精製水を使用してください。
重量	本体重量: 18kg / 水充填時: 27kg	付属品	取扱説明書・簡単操作ガイド・保証書(1年間)
電源	定格電源電圧: 100-120V 50/60Hz	一般的名称	血漿融解装置
同時融解バック数	最大8バック(標準4バック)	販売名 / 型式	Barkeyプラスマサーム / 型式: DTM-V201
融解温度 / 加熱時間	37℃ / 初期設定20分(変更可能)	製造国 / 製造会社	ドイツ / Barkey GmbH & Co. KG

医療機器届出番号：13B2X00117000030

製造販売元

Something to Life **METS** 株式会社 メッツ

〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mets-tokyo.jp

ホームページに
アクセス



代理店