
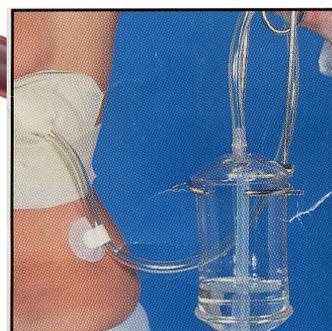


チューブ類の簡易固定材

SkinFix

スキンフィックス 2703/50

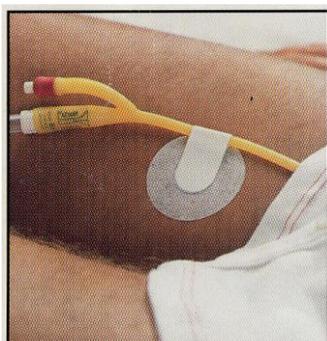

《特長》

- 様々なチューブ、カテーテル類を簡単に素早く固定できます。また、モニター等のケーブルの固定にも有用です。
- タブ接着面（チューブ固定部）は、繰り返し開閉ができるため、チューブの交換ができます。
- 皮膚への接着部は通気性に優れ、長時間の装着に対しても患者さんに不快感を与えません。
- スキンフィックスは、接着剤を含め耐水性の材料を採用しているため、汗や水の影響を受けにくくなっています。

《主な用途》


- 導尿用ドレーン、胸腔ドレーン、輸液ライン、酸素カテーテル、モニター用ケーブル、その他のチューブ、ケーブル類の固定。

《包装》


- 50個入り／袋
- 500個（10袋）入り／箱
- 販売単位：袋

届出番号：13B2X00117000008


スキンフィックスの使用法

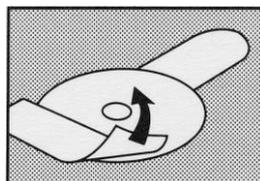


①接着面のシールを剥がして下さい。

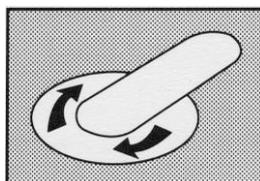


②適正部位に貼り付けて下さい。

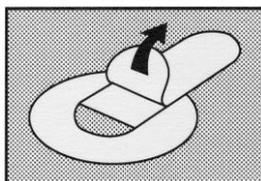

③タブ接着面のシールを剥がして下さい。

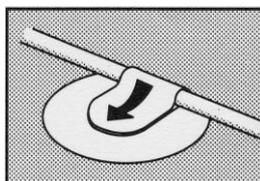

④タブ接着面にチューブを置き、タブを折り返して接着面同士をしっかりと貼り合わせて下さい。

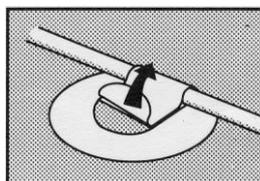

⑤タブは、繰り返し開閉できチューブの交換ができます。

Ambu

製造販売元：

Something to Life **METS** 株式会社 メッツ
〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 http://www.mets-tokyo.jp

販売代理店：