

人工呼吸器チェッカーvenTest 制御用ソフトウェア

VT Manager (日本語・USB)



型式：DSVM10

簡単 日本語ソフトウェアによる簡単操作！

便利 テストレポートを自動作成！履歴の管理ができる！



パソコン制御



VT ManagerによりvenTest本体で行う操作がパソコン上から簡単に出来ます

効率の良いテストを実現

VT Managerの使用により、テスト設定・実行、合否判定やレポート作成まで全てパソコン上から操作でき、簡単に効率良くテストが行えます。

オリジナルのテストパターンが作れる

テストしたい項目・数値を設定し、オリジナルのテストパターンを作成できます。テストパターンはいつでも作成できますので、簡易点検や定期点検など用途に合わせてテストを実行できます。

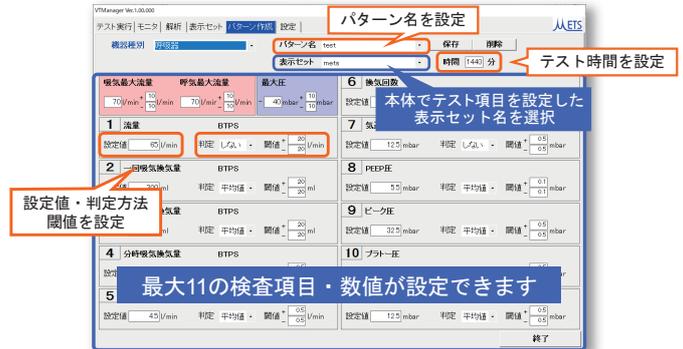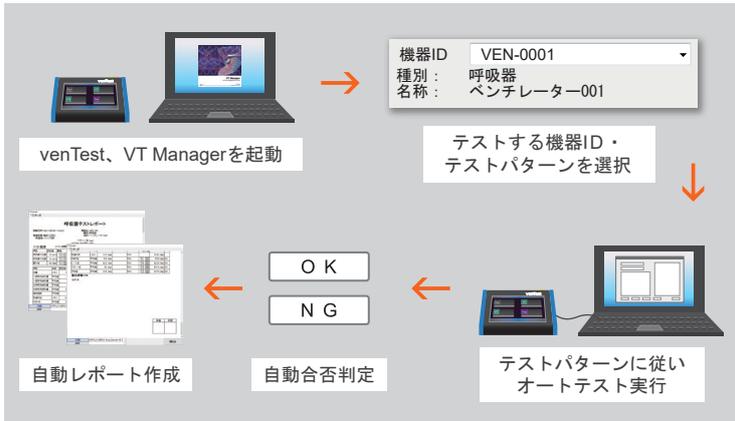


一回吸気換気量、一回呼気換気量、分時吸気換気量、分時呼気換気量、吸気時間、呼気時間、湿度、気道内圧、PEEP圧、ピーク圧、プラトー圧、平均圧、酸素濃度など


簡単オートテスト・自動合否判定

設定した項目と数値のとおり、テストから合否判定まで自動で行います。ひとつの機器に対し簡易点検や定期点検を効率的に行うことができます。

予め設定したテストパターン（項目・数値）に従い自動でテストを行い、設定した閾値から自動で合否判定が行われます。また、11項目のパラメータを同時に表示、『流量・圧波形』やvenTest本体では表示されない『圧-換気量曲線』が表示され、現在のテスト状況が確認できます。

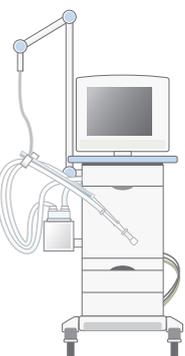

圧-換気量曲線 (PVループ)

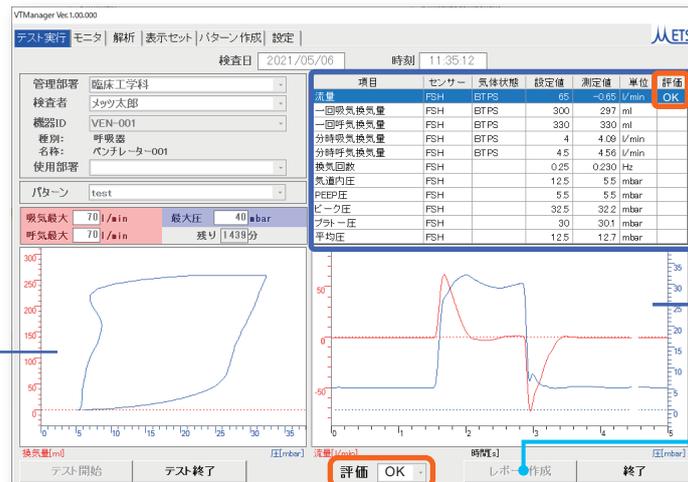

自動合否判定

11項目のパラメータを同時に表示！

流量・圧波形

テスト後はレポート作成ボタンで簡単にレポートが作れる！



テスト解析画面

テスト終了後、テスト中の『流量と圧』を細かく解析することが可能です

波形位置や時間軸を変更できます




流量・圧・秒差
流量差・圧差を表示



検査履歴のデータ管理

検査履歴をデータベース化することにより効率的に管理できます

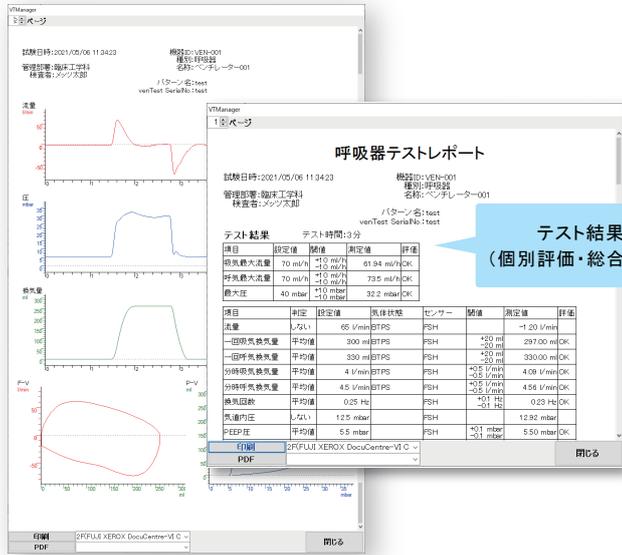

テスト結果
(個別評価・総合評価)



簡単自動レポート作成

行ったテストパターンのテスト結果（評価・テスト内容詳細）が明記されたレポートを、レポート作成ボタンから自動で作成することができます。また、PDF形式での保存が可能です。



総合評価、コメントで機器状況を把握

一項目でもNGがあった場合は、総合評価はNGとなります。任意のコメント（要修理・使用不可など）を入力することができる為、各機器の状況を把握することが可能です。



レポート印刷

作成したレポートは簡単に印刷できる為、書類として保管・管理することができます。



検査レポートの履歴管理

表示機器の選択や各条件の並べ替えにより、電子データとして保存された過去の検査履歴を、簡単に閲覧できます。



弊社チェッカソフトのデータを、まとめて管理できます！

LAN接続により、弊社ME機器制御用ソフトウェアを使い他のパソコンで行ったテスト結果のデータを、ひとつのパソコンにまとめて管理することが可能です。



リスト印刷・CSV出力が可能

ボタンひとつで、機器種別ごとのリスト印刷が可能で、管理記録が簡単に作成できます。また、履歴をCSV形式で出力し、市販の表計算ソフトなどを用いた点検履歴を作成可能です。

※黄背景の機器は、上の白背景の機器にひもづいているデータです。

※VT Managerと弊社ME機器情報管理システムMe-ARCの連携により、ME機器の在庫管理と精度管理を1つのシステム上で行うことができます。

※この資料に記載されているメーカー名、製品名等は、該当各社の商標または登録商標です。Datrend Systems社が各社の保証を得ているか、何らかの提携関係にあるわけではありません。

製造販売元



〒120-0036 東京都足立区千住仲町1-7 E-mail:sales@mets-tokyo.jp
TEL:(03)3888-8445 FAX:(03)3888-8443 https://www.mets-tokyo.jp



ホームページに
アクセス



代理店